

## 警告

- ・改造はしないこと また、分解したり修理をしないこと 正常にはたらかず、けがの原因になります。
- ・製品本体の上に乗ったり、ぶら下がらないこと 製品本体が破損し、けがの原因になります。

## 注意

- ・使用前にネジのゆるみなど各部に異常がないか点検し使用すること 転倒し、けがの原因になります。
- ・使用者の身体状況によっては、介助者が付き添ったり、お買い上げの販売店やケアマネジャーなど専門家に相談すること
- ・必ず平坦な場所で使うこと
- ・子供や幼児を遊ばせる、子供の落下防止柵等、他の用途では使用しないこと
- ・直射日光を避けて、室内のみで使用すること 変色やソリの原因になります。
- ・人や物をのせたまま移動させないこと 故障やけがの原因になります。
- ・体重が 100kg を超える方は使用しないこと 本体が破損する恐れがあります。
- ・次にあげるものではお手入れしないこと

[シンナー] [クレゾール] [酸、アルカリ性洗剤]

[塩素系薬剤 (洗剤) や熱湯 (煮沸消毒など) による殺菌、消毒]

[磨き粉、タワシ、研磨剤入りスポンジ、その他製品を傷つけるもの]

製品が劣化し、破損の原因になります。

## 取り付けの前に

### ●使用上の注意

- ①10～15cm くらいのマットレスが使用に適しています。  
(それ以上の厚みのマットですと手すりの機能が果たせない可能性があります。)
- ②天板に十分な厚みがある場合は、固定金具を広げ、付属のネジでとめてください。
- ③天板に厚みが無く、強度が弱いもの (合板・MDF など) で、ネジどめが難しい場合は、別売りのベルトにてベッドと固定してください。

### ●取り付けの前の確認

ベッドへの取り付け前に、手すりがベッドへ取り付け可能か確認してください。下記に当てはまる場合には、手すりの取り付けができないことや、取り付け・使用に際して注意する必要があります。

## ●取り付けができないベッド

■ベッドの天板強度が弱いもの ■電動リクライニング機能付きベッド

■ウッズプリングベッド（天板が骨組みアーチ状になっていて弾性をもたせているもの）

## ●取り付け・使用に注意が必要なベッド

■下部に引き出しがあるベッド

引き出しが使用できなくなる可能性があります。

■折りたたみ式のベッド

手すりを取り付けた状態では折りたたみが出来なくなります。

■軽量なベッド

使用時にベッドがずれる恐れがあります。ベッドがずれやすい場合には、ベッドを壁際に設置するなどのずれ防止対策を行った上で使用してください。

■パイプベッドなどのフレームが金属製のベッド・畳ベッド

ネジどめによる取り付けが出来ない可能性があります。

## 部材一覧



① 手すり

② サポートフレーム

③ サイドハンドバー

④ 取付ネジ


⑤ ノブネジ

⑥ E型クイックボルト

# 組み立て方



1. ⑥E型クイックボルトを両側から取り外す。

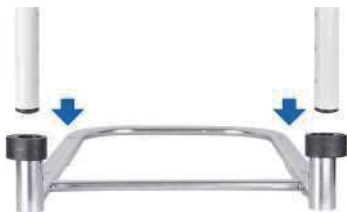

2. ①手すりを②サポートフレームへ挿し込む。



3. お好みの高さに合わせて、⑥E型クイックボルトを差し込む。



4. ③サイドハンドバーを⑤ノブネジで取り付ける。




5. ②サポートフレームの固定プレートを開く。



6. 必要な場合は④取付ネジでベッドの床板へ固定する。



7. 付属品の収納ポケットを取り付ける。

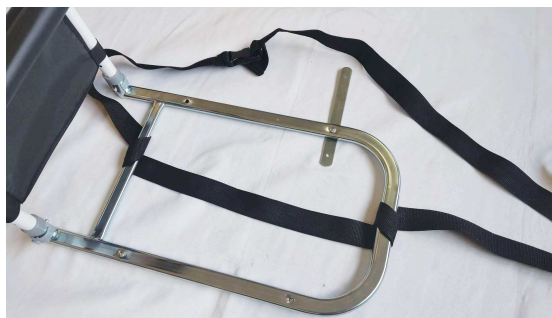

8. お好みに専用ベルト（別売）を②サポートフレームとマットレスに巻きつけて固定する。

## 製品仕様

品名	ベッド用手すり
品番	SR-BH010R
サイズ（約）	幅 52× 奥行 54× 高さ 43～49cm
重量（約）	2.7kg
耐荷重量（約）	100kg
材質	炭素鋼
付属品	収納ポケット

サポートセンター

**0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

**e-mail: support@sunruck.com**

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）  
<https://www.sunruck.com/>

LINEからお問い合わせ



QRコードから友達追加後、メッセージ送信が可能となります。順番にご対応させていただきますので、ご回答お時間いただく場合がございます。