



折りたたみ式立ち上がり手すり



Sun Ruck 品番：SR-HS072

耐荷重量
140 kg

この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

 警告	この表示の内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷などを負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

警告

- ・ 製品は、寝具からの起き上がり、イスからの立ち上がりなどの動作サポートのための手すりです。それ以外の用途で使用しないでください。
- ・ 手すり部がめれた状態で使用しないでください。
- ・ 子供を遊ばせる遊具として使用しないでください。
- ・ 手すり部に頭や手足を入れないでください。
- ・ 製品は1人用です。2人以上で同時に使用しないでください。
- ・ 改造や加工をしないでください。
- ・ 予測できない行動をとる、自力で危ない状態から回避することができない方は使用しないでください。

注意

- ・ 結露した場合は、乾いた布などでふき取ってください。
- ・ 定期的な点検を行い、ガタつきやねじのゆるみ、部品の破損がないことを確認してください。
- ・ 製品は直射日光の当たらない乾燥した常温の屋内で保管してください。
- ・ 平らで平行な場所に設置してください。
- ・ 設置後、ガタつき、ネジのゆるみがないことを必ず確認してください。また、固定式ではないため設置後の安定性にも十分ご注意ください。
- ・ ご使用の際は幼児が近づかないようにしてください。
- ・ 介助者が必要な方が使用する場合は、十分ご注意ください。

製品仕様

使用時サイズ：W51×D38×H71.5 / 76.5 / 81.5 / 86.5cm

収納時サイズ：W51×D11×H78cm

材質：アルミ、スチール、EVA

製品重量：約 2.2kg

耐荷重量：140kg

■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。
サポートセンター


☎ 022-486-3390

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）

http://www.sunruck.com/

広げ方・折りたたみ方

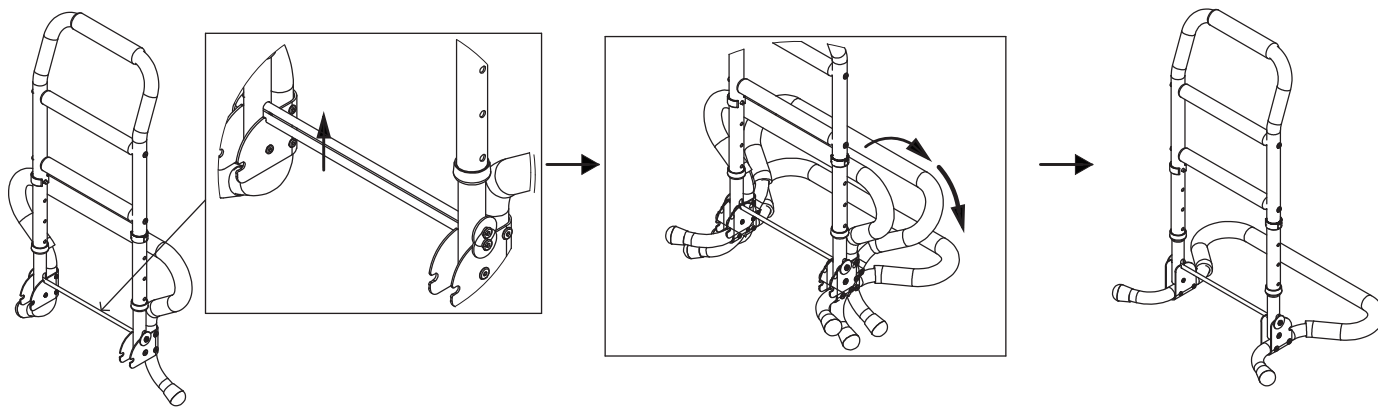


レバーを上げロックを解除します。

レバーを上げたまま手すりの足を広げていきます。

カチッとなるまで広げたら完了です。

※折りたたむ場合は、レバーを上げてロックを解除して手すりの足をたたみます。

高さ調節の仕方

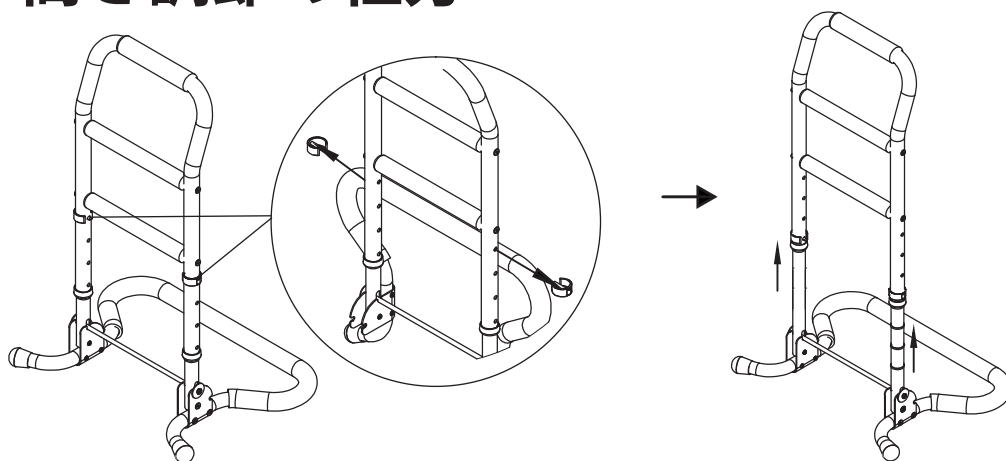

両側についているストッパーを外します。

お好みの高さに調節し、内穴と外穴を合わせ、ストッパーで止めれば完了です。

⚠️注意

手すりは、外側（体の反対側）に丸い方の足がくるようにして使用します。

